

STRONA INFORMACYJNA

ZAWARTOŚĆ

Po otrzymaniu urządzenia LifeVac należy sprawdzić kompletność dostawy zamówienia. Standardowa zawartość w przypadku każdego typu konfiguracji urządzenia LifeVac jest następująca. Można zakupić dodatkowe maski w wymaganym rozmiarze. W zestawie znajduje się maska szkoleniowa wraz z instrukcją jej użycia, pozwalająca zapoznać się z urządzeniem LifeVac przed jego użyciem w sytuacji nagłej.

Po otrzymaniu zestawu LifeVac należy wzrokowo sprawdzić jego zawartość pod kątem ewentualnych wad lub pęknięć.

LV01 — zestaw standardowy LifeVac — zawartość: 1 urządzenie LifeVac, 3 maski, których rozmiar jest oznaczony kolorową etykietą, 1 instrukcja stosowania, 1 ulotka z protokołem BLS, 1 karta informacyjna.

LV07 — zestaw LifeVac EMS — zawartość: 1 urządzenie LifeVac, 1 bardzo duża maska dla osób dorosłych oznaczona czerwoną etykietą, 1 duża maska dla osób dorosłych oznaczona pomarańczową etykietą, 2 średnie maski dla osób dorosłych oznaczone zieloną etykietą, 1 mała maska dla osób dorosłych oznaczona żółtą etykietą, 1 maska pediatryczna oznaczona białą etykietą, 1 instrukcja stosowania, 1 ulotka z protokołem BLS, 1 karta informacyjna.

LV08 — zestaw LifeVac do montażu na ścianie — zawartość: 1 urządzenie LifeVac, 1 duża maska dla osób dorosłych lub 1 maska pediatryczna, 2 średnie maski dla osób dorosłych, 1 mała maska dla osób dorosłych, 1 instrukcja stosowania, 1 x ulotka z protokołem BLS, 1 karta informacyjna, 1 plakat A3 z protokołem, 1 zestaw mocowań do montażu na ścianie.

Dostępne są dodatkowe akcesoria do urządzenia LifeVac.

Są to następujące akcesoria:

Maski w rozmiarach XL, L, M, S i pediatryczne, pusta skrzynka z tworzywa sztucznego do montażu na ścianie, torba EMS z przezroczystego tworzywa sztucznego, torba podróżna LifeVac. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem www.lifevac.uk.

URZĄDZENIE LIFEVAC MOŻNA STOSOWAĆ U DZIECI O WADZE PONIŻEJ 10 KG JEDYNIĘ PO ZAŁOŻENIU MASKI PEDIATRYCZNEJ, OZNACZONEJ BIAŁĄ ETYKIETĄ.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Urządzenie LifeVac jest jednorazowym urządzeniem ratunkowym przeznaczonym do resuscytacji ofiary zadławienia, gdy standardowe podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) nie przynoszą wyników lub nie można ich zastosować. Urządzenie LifeVac jest proste w użyciu, ogólnodostępne i może być ostatnią deską ratunku dla ofiary zadławienia, gdy zawiodą wszystkie inne sposoby.

OGÓLNE POSTĘPOWANIE

Urządzenie LifeVac należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie przechowywać w garażach ani na strychach, ponieważ skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą negatywnie wpłynąć na integralność urządzenia. Idealnym miejscem do przechowywania urządzenia jest szafka kuchenna lub inne miejsce dostępne w razie nagłej potrzeby. Po przeszkoleniu się w stosowaniu urządzenia LifeVac należy wyrzucić maskę szkoleniową i zapakować urządzenie, maski oraz literaturę z powrotem do torby do przechowywania w takiej postaci, w jakiej je odebrano. Należy upewnić się, że do urządzenia nie są przymocowane żadne maski. Należy okresowo sprawdzać maski i zdecydowanie warto rozważyć ich wymianę co dwa lata. Maski zamienne można zamówić na stronie www.lifevac.uk. Urządzenie LifeVac nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego.

ZASADY ZWROTU

Sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma pęknięć ani uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad należy niezwłocznie skontaktować się z firmą na stronie www.lifevac.uk lub pod adresem info@lifevac.uk w celu dokonania wymiany lub zwrotu środków. Wszystkie wady należy zgłosić w ciągu 5 dni od daty wystawienia faktury.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Urządzenie LifeVac należy zastosować, gdy standardowy protokół BLS został zastosowany bezskutecznie lub nie można go zastosować. Urządzenia LifeVac można używać WYŁĄCZNIE do resuscytacji ofiary zadławienia. Urządzenia LifeVac nie należy używać, jeśli ofiara nie dławi się i oddycha samodzielnie. Urządzenie LifeVac jest przeznaczone wyłącznie do stosowania u ludzi. Należy je stosować jedynie na twarzy. Urządzenie LifeVac nie zawiera lateksu. Urządzenia LifeVac nie należy stosować u osób o masie ciała poniżej 10 kg bez użycia maski pediatrycznej. Urządzenia LifeVac nie należy stosować u pacjentów z rurką dotchawiczą. Maski są w zestawie i obowiązują wytyczne producenta. Producenci sugerują 24-miesięczny okres trwałości masek.

ZAGROŻENIA

Urządzenie LifeVac nie gwarantuje resuscytacji ofiary zadławienia. W zestawie znajduje się maska wraz z instrukcją dotyczącą jej orientacji, pozwalająca zapoznać się z urządzeniem przed wykorzystaniem w nagłej sytuacji. Urządzenie stosuje się na własne ryzyko. Firma LifeVac nie ponosi odpowiedzialności za uraz i/lub zgon wynikające z użytkowania urządzenia. Zagrożenia mogą obejmować zasinienie twarzy spowodowane nałożeniem maski oraz kaszel po zdjęciu przedmiotu. W celu zmniejszenia tego ryzyka urządzenie LifeVac należy stosować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Więcej informacji i filmy instruktażowe można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem www.lifevac.uk.



Uwaga: przed użyciem należy przeczytać wszystkie dokumenty



Produkt nie zawiera lateksu



Ponowne użycie jest niedozwolone



Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym



Obchodzić się ostrożnie

Procedura określania orientacji/testowa




Rozpakować maskę TEST i włożyć ją do podstawy urządzenia LifeVac ruchem skrętnym, wywierając jednocześnie nacisk. Sprawdzić, czy maska jest prawidłowo i mocno przymocowana.



Trzymając maskę jedną ręką, przytrzymać ją mocno w miejscu, a drugą ręką nacisnąć uchwyt. Słyszalny będzie pęd powietrza wydobywającego się z urządzenia.



Po całkowitym wciśnięciu uchwyty należy go szybko odciągnąć w górę. Czuć będzie podciśnienie wytwarzane przez urządzenie LifeVac.

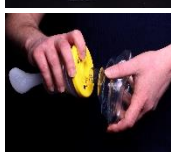

Po zapoznaniu się z urządzeniem LifeVac należy zdjąć maskę, przekręcając ją i odciągając, trzymając jednocześnie podstawę urządzenia LifeVac. Zdjęcie maski powinno być trudne. Znaczy to, że maska została prawidłowo zamocowana. Maskę testową należy zachować do dalszego szkolenia i oznaczyć



Ponownie zapakować urządzenie LifeVac, maski i literaturę do oryginalnego opakowania. Zestaw LifeVac należy przechowywać w bezpiecznym, suchym i dostępnym miejscu na wypadek

Instrukcja stosowania

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI STANDARDOWYMI PROTOKOŁAMI BLS DOTYCZĄCYMI ZADŁAWIENIA I WEZWAĆ SŁUŻBY RATOWNICZE



Rozpakować odpowiednią nieużywaną maskę. Włożyć maskę do podstawy urządzenia, popychając ją i przekręcając, a jednocześnie wywierając nacisk. **Upewnić się, że maska jest dobrze przymocowana do urządzenia LifeVac.**




Odchylić głowę do tyłu, umieścić górną część maski na grzbiecie nosa, między oczami, a dolną część maski nad ustami. Brzeg maski powinien znajdować się między dolną wargą a podbródkiem. W razie potrzeby otworzyć usta kciukiem, jeśli są zamknięte. **Maskę należy przez cały czas mocno przytrzymywać dłońią nad nosem i ustami, aby zapewnić szczelność.**



Trzymając maskę mocno jedną ręką drugą, dominującą rękę położyć na uchwycie. **Przytrzymać uchwyt, a następnie popchnąć go w dół, aby ścisnąć mieszek.**



Po wciśnięciu mieszków **pociągnąć uchwyt w górę zdecydowanym, szybkim ruchem, cały czas jednocześnie przytrzymując maskę drugą ręką.**

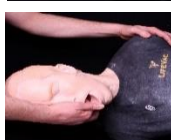

Obrócić osobę na bok i przetrzeć jej usta, aby usunąć z nich ewentualne zanieczyszczenia. **Sprawdzić również, czy nie ma zanieczyszczeń w urządzeniu LifeVac, w razie potrzeby powtórzyć kroki maksymalnie 5 razy.**

JEŻELI NIE STWIERDZONO SPONTANICZNEGO ODDYCHANIA, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STANDARDOWYM PROTOKOŁEM BLS RESUSCYTACJI KRAŻENIOWO-ODDECHOWEJ



INSTRUKCJA STOSOWANIA W PRZYPADKU ZADŁAWIENIA

Jeśli poszkodowany jest ofiarą zadławienia

1 Zachęcić poszkodowanego do kasłania.

2 Jeśli kasłanie nie przynosi wyników, wykonać 5 uderzeń w plecy.



3 Jeżeli przyczyna niedrożności nie zostanie usunięta, wykonać 5 chwytów Heimlicha.



Powtarzać sekwencję do chwili usunięcia przyczyny niedrożności lub utraty przytomności przez poszkodowanego

Po utracie przytomności lub jeśli nie można zastosować kroków 2 i 3, należy wezwać służby ratownicze i użyć urządzenia Lifevac.

4




Nałożyć na usta i nos, tworząc dobre uszczelnienie z maską o odpowiednim rozmiarze

Wcisnąć uchwyt/mieszek

Odciągnąć uchwyt/szarpnięcie

1 ZAŁOŻYĆ 2 WCISNAĆ 3 ODCIĄGNAĆ

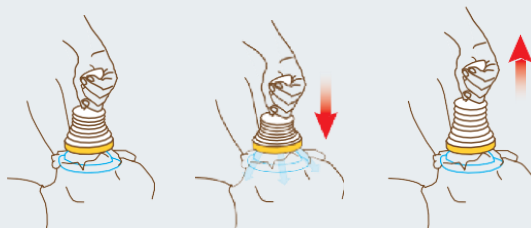

POWTARZAĆ AŻ DO USUNIĘCIA NIEDROŻNOŚCI LUB MAKSYMALNIE 5 RAZY

Jeżeli niedrożność nie zostanie usunięta, rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową

LifeVac Europe Ltd, Unit 2, Hill Village Business Park

Barnstaple, Devon EX32 0RP

www.lifevac.UK



LIFEVAC EUROPE LTD